

Single Cartridge Hand Dispenser

Serie SHD

Uso previsto

Dispensatore manuale per cartucce **MASTDISCS**[®].

Contenuto

SHD1 confezione contenente 1 dispensatore

SHD5 confezione contenente 5 dispensatori.

Saranno disponibili eventuali altri formati.

Descrizione

Dispositivo in plastica blu da utilizzare con i test tradizionali per le tecniche in agar diffusione.

Progettato per un utilizzo occasionale, il dispensatore manuale offre un metodo rapido, facile ed economico per dispensare i dischetti da una singola cartuccia.



Istruzioni

1. Impugnare il dispensatore con l'estremità più sottile rivolta verso l'alto.
2. Inserire la cartuccia nell'apposito spazio cilindrico del dispensatore con l'estremità che espone i dischetti rivolta verso il basso.
3. Allineare la dentellatura della cartuccia con la scanalatura presente nel dispensatore.
4. Premere la cartuccia verso il basso fino a sentire lo scatto di posizionamento.
5. Per dispensare i dischetti, premere il braccio laterale flessibile verso la cartuccia. In questo modo sarà dispensato 1 singolo dischetto.
6. Una volta che è stata esaurita l'intera cartuccia, è possibile rimuoverla tirandola verso l'alto. Il dispensatore può quindi essere utilizzato nuovamente inserendo un'altra cartuccia.

Conservazione e validità

I dispensatori possono essere conservati a temperatura ambiente.

Il dispensatore contenente la cartuccia deve invece essere conservato a 2 a 8° C all'interno dell'apposito contenitore ermetico comprendente anche l'agente essiccante gel di silice.

Lasciare sempre che il dispensatore carico o le cartucce raggiungano la temperatura ambiente prima di essere aperte.

Precauzioni

Da utilizzare esclusivamente per uso diagnostico *in vitro*. Rispettare le precauzioni di sicurezza e impiegare tecniche asettiche.

Il dispositivo deve essere utilizzato solo da personale di laboratorio opportunamente qualificato.

Prima dell'eliminazione, sterilizzare tutti i materiali biologici pericolosi.