

Single Cartridge Hand Dispenser

SHD Serie

Verwendungszweck

Ein Handdispenser für den Gebrauch mit MAST® Antibiotika-Testblättchen (MASTDISCS®) in Kartuschen.

Inhalt

SHD1 packungen enthalten je einen Handdispenser, SHD5 enthält je 5 Handdispenser. Andere Packungsgrößen sind auf Anfrage erhältlich.

Beschreibung

Ein blaues Kunststoffzubehör für den Gebrauch bei klassischer Agardiffusionstechnik. Dieser Handdispenser bietet für gelegentliche Verwendung von Kartuschen eine schnelle, einfache und kostengünstige Lösung, um Testblättchen aus Einzelkartuschen zu verwenden.



Anwendung

1. Halten Sie den Dispenser wie auf der Abbildung gezeigt.
2. Schieben Sie die Kartusche in die zylindrische Halterung mit der offenen Seite nach unten.
3. Die Leiste der Kartusche in die Nut des Dispensers einrasten.
4. Die Kartusche nach unten drücken bis sie einrastet.
5. Um ein Testblättchen herauszudrücken, den Seitenarm des Dispensers in Richtung der Kartusche drücken.
6. Um eine leere Kartusche zu entfernen, einfach diese nach oben herausziehen. Der Dispenser kann danach neu bestückt werden.

Lagerung und Haltbarkeit

Der Handdispenser kann bei Raumtemperatur gelagert werden. Zusammen mit einer Kartusche sollte er bei 2 bis 8°C in einem luftdichten Behälter mit Silicagel gelagert werden. Vor Benutzung sollten sowohl Dispenser als auch Kartusche auf Raumtemperatur gebracht werden.

Vorsichtsmaßnahmen

Nur für *in vitro* Diagnostik. Beachten Sie geeignete Sicherheits- und Sterilitäts-Maßnahmen. Nur von geeignetem trainierten und qualifizierten Personal zu benutzen. Alle biologisch gefährlichen Gegenstände vor der Entsorgung sterilisieren.