

MASTABLOT™ TP

Nachweis von Antikörpern gegen
Treponema pallidum

 Reaktiv-
kontrolle

 Serum
kontrolle

 TpN47

 TnpA

 TpN17

 TpN15

 Cut-off

- Hoch spezifisch
- Für Serum und Plasma
- Gebrauchsfertige Reagenzien

Reaktionsübersicht der Antikörpernachweise im MASTABLOT™

IgG	IgM
Nitrocellulosestreifen mit 1,5 mL Serumdiluent überschichten ▽	Nitrocellulosestreifen mit 1,5 mL Serumdiluent überschichten ▽
10 min bei RT (18–24 °C) inkubieren ▽	10 min bei RT (18–24 °C) inkubieren ▽
15 µL Probe bzw. Kontrolle in die Inkubationswanne pipettieren	30 µL Probe bzw. Kontrolle in die Inkubationswanne pipettieren
▽	▽
60 min bei RT unter Schütteln inkubieren ▽	120 min bei RT unter Schütteln inkubieren ▽
3 x mit 1,5 mL Waschpuffer unter Schütteln für 5 min waschen ▽	3 x mit 1,5 mL Waschpuffer unter Schütteln für 5 min waschen ▽
1,5 mL IgG-Konjugat zugeben	1,5 mL IgM-Konjugat zugeben
▽	▽
60 min bei RT unter Schütteln inkubieren ▽	60 min bei RT unter Schütteln inkubieren ▽
3 x mit 1,5 mL Waschpuffer unter Schütteln für 5 min waschen ▽	3 x mit 1,5 mL Waschpuffer unter Schütteln für 5 min waschen ▽
1,5 mL Substrat zugeben	1,5 mL Substrat zugeben
▽	▽
5–8 min bei RT unter Schütteln inkubieren ▽	8–10 min bei RT unter Schütteln inkubieren ▽
Substrat abgießen und Reaktion mit Leitungswasser stoppen	Substrat abgießen und Reaktion mit Leitungswasser stoppen
Reaktionszeit: 170 min	Reaktionszeit: 230 min

Bestellinformation

Artikel-Nr.	Bezeichnung	Inhalt
6653G08	MASTABLOT™ TP IgG	8 Streifen
6653M08	MASTABLOT™ TP IgM	8 Streifen
626653GK	TP IgG positives Serum	0,1 mL
626653MK	TP IgM positives Serum	0,1 mL

V. 2015-11-09

United Kingdom
Mast Group Ltd.
Mast House
Derby Road, Bootle
Merseyside L20 1EA

Tel: +44 (0)151 933 7277
 Fax: +44 (0)151 944 1332
 e-mail: sales@mastgrp.com

Germany
Mast Diagnostica GmbH
Feldstraße 20
DE-23858 Reinfeld

Tel: +49 (0)4533 2007 0
 Fax: +49 (0)4533 2007 68
 e-mail: mast@mast-diagnostica.de

France
Mast Diagnostic
115 rue Jules Barni
CS 91106
80011 Amiens CEDEX 1

Tél: +33 (0)322 80 80 67
 Fax: +33 (0)322 80 99 22
 e-mail: info@mast-diagnostic.fr