

IVD solutions through partnership



Pelikloon Anti-D C €0344

Produktinformation

Pelikloon Anti-D C€ 0344

Monoklonale Anti-D Reagenzien der Firma Sanquin Reagents

Pelikloon Anti-D (IgM) monoklonal,
Klon RUM-1 / Art.-Nr. 521020

Pelikloon Anti-D mix (IgG/IgM) monoklonal,
Klon MS-26, TH-26 / Art.-Nr. 521011

Schwach ausgeprägte D-Antigene und D-Varianten (einschließlich D^v) werden im Röhrchentest detektiert.

Die monoklonalen Anti-D Reagenzien von Sanquin sind auch für den Gebrauch auf Mikrotiterplatten geeignet.

	Anti-D IgM	Anti-D mix (IgG/IgM)
normales D	4+	4+
schwach ausgeprägtes D-Antigen	0.5/2+	0.5/3+
RhD Variante Kategorie VI	negativ	1+/3+*
RhD 33 Antigen	2+/3+	2+/3+
RhD DFR Variante	negativ	1+/3+*
andere RhD Varianten	2+/4+	2+/4+


* = nach Zugabe von Anti-Humanglobulin (IAT)

Bestimmung des Rh-Merkmals D

(gemäß den Richtlinien zur Gewinnung von Blut und Blutbestandteilen und zur Anwendung von Blutprodukten (Hämotherapie) von 2017)

Empfängerserologie (einschließlich Schwangere und Neugeborene)

Ansatz mit Anti-D (IgM) monoklonal
und Anti-D mix (IgG/IgM) monoklonal

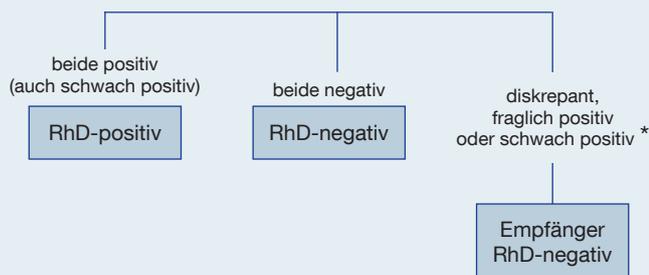


* Differenzierung mit molekulargenetischen Verfahren bei Mädchen, gebärfähigen Frauen und Patienten mit chronischem Transfusionsbedarf

- RhD Genotyp weak D Typ1, 2 oder 3 gelten als RhD-positiv
- Schwangere mit Merkmalen weak D Typ1, 2 oder 3 benötigen keine Rhesusprophylaxe

Spenderserologie

Ansatz mit Anti-D (IgM) monoklonal
und Anti-D mix (IgG/IgM) monoklonal

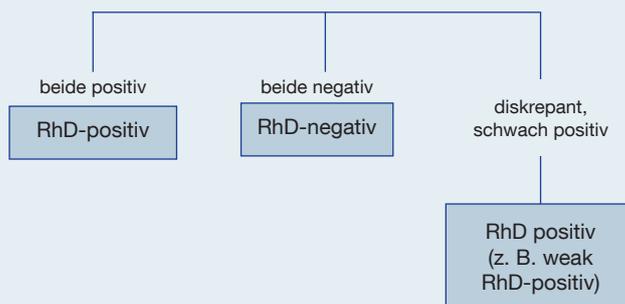

MD V.2.0 / 2022-02-17

Sanquin Reagents B.V.

Plesmanlaan 125
1066 CX Amsterdam
The Netherlands

Tel: +31 (0)20-5123599

Fax: +31 (0)20-5123570

e-mail: reagents@sanquin.nl

www.sanquin.nl



Vertrieb durch:

Mast Diagnostica GmbH
Feldstraße 20
DE-23858 Reinfeld

Tel: +49 (0)4533 2007 0

Fax: +49 (0)4533 2007 68

e-mail: mast@mast-diagnostica.de

www.mast-group.com

