

Adenovirus Respiratory – Positive Control

Code Produit : 7256031

IU_IUE-7256031 Ed00

UTILISATION

Les contrôles positifs sont utilisés pour vérifier que les réactifs d'extraction et le test fonctionnent correctement.

- **Vitassay Adenovirus Respiratory Positive Control** : Contrôle positif pour les tests de recherche d'Adénovirus Resp avec les kits Vitassay.



COMPOSITION

Vitassay Adenovirus Respiratory Positive Control : Antigènes inactivés de Adénovirus Resp déshydratés dans un écouvillon contenant un conservateur.

PRECAUTIONS

- Usage professionnel invitrouinement.
- Ne pas utiliser après ladate d'expiration.
- L'écouvillon doit être effectué dans les 2 heures suivant l'ouverture du sachet scellé.
- Ne pas utiliser pas l'écouvillon si le sachet aluminium a été endommagé pendant le stockage
- L'écouvillon doit être jeté dans un récipient biologique approprié après le test.
- Les réactifs contiennent des conservateurs. Éviter tout contact avec lapeau ou les muqueuses. Consulter la fiche de sécurité, disponible sur demande.
- Suivre les Bonnes Pratiques de Laboratoire, porter des vêtements protecteurs, utiliser un masque, des lunettes et des gants jetables. Ne pas manger, boire ou fumer dans la zone detravail.

STOCKAGE ETSTABILITE

Stocker dans le sachet scellé au réfrigérateur ou à température ambiante (2 °C à 30°C).

Le test est stable jusqu'à la date de péremption indiquée sur le sachet scellé.

Le test doit rester dans son sachet scellé jusqu'à utilisation.

Ne pas congéler.

MATERIELS

MATERIELS FOURNIS	MATERIELS NECESSAIRE NON FOURNIS
<ul style="list-style-type: none"> ▪ Ecouvillon Vitassay Adenovirus Respiratory Positive Control ▪ Tube test. ▪ Pipettejetable. ▪ Noticed'utilisation 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Produits Vitassay avec ligne de test Adénovirus. ▪ Diluant échantillon et contrôles. ▪ Gantsjetables. ▪ Minuteur.

PROCEDURE


Laisser les tests et les écouvillons de contrôle positif revenir à température ambiante (15-30°C) avant le test.

Ne pas ouvrir le sachet avant l'exécution du test.

Procédure pour carte simple et carte double :

Exemple : Procédure de la référence : 7355040 : **Vitassay Adenovirus Resp.**

1. Ajouter 15 gouttes (figure 1) de diluant et introduire immédiatement l'écouvillon de contrôle positif dans le tube test.
2. Mélanger la solution en faisant tourner l'écouvillon de contrôle positif fermement sur les parois du tube test pendant 1 minute minimum. Extraire autant de liquide que possible de l'écouvillon, en le pressant sur les parois du tube test lors de son retrait (figure 2). Jeter l'écouvillon.
3. Retirer le **Vitassay Adenovirus Resp.** de son sachet scellé juste avant de l'utiliser.
4. Utiliser une pipette séparée pour chaque contrôle à tester. Distribuer 4 gouttes du tube test dans la fenêtre circulaire marquée par la lettre (S) (figure 3).
- 5 Lire les résultats à **10 minutes**. Ne pas lire les résultats du test au- delà de 10 minutes.

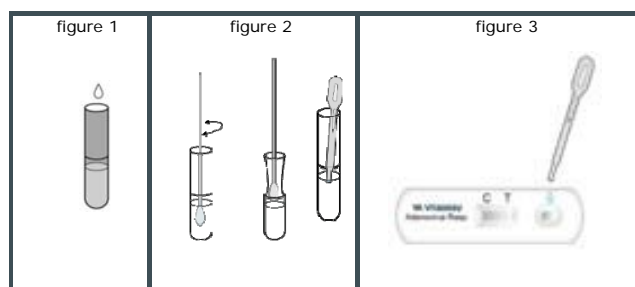

Procédure pour multiplex :

Exemple : Procédure de la référence : 7715043 : **Vitassay Influenza A + B + RSV + Adenovirus Resp.**


1. Mélanger la solution en faisant tourner l'écouvillon de contrôle positif fermement sur les parois du flacon pendant 1 minute minimum. Extraire autant de liquide que possible de l'écouvillon, en pressant l'écouvillon contre les parois du flacon à mesure que l'écouvillon est retiré (figure 2). Jeter l'écouvillon.

Cette procédure doit être effectuée avec tous les écouvillons de contrôle positif en utilisant le même flacon.

2. Retirer le **Vitassay Influenza A + B + RSV + Adenovirus Resp** de son sachet scellé juste avant de l'utiliser.

3. Prendre le flacon contenant les antigènes extraits de l'écouvillon de contrôle positif (Adénovirus), placer-le dans le tube multiplex (figure 2). Visser fermement le bouchon du tube multiplex. Le fond du flacon va se casser et la solution va atteindre la zone d'échantillonnage des zones (figure 3).

4. Laisser le tube multiplex en position verticale sur une surface plane et lire les résultats à **10 minutes**. Ne pas lire les résultats du test au-delà de 10 minutes.

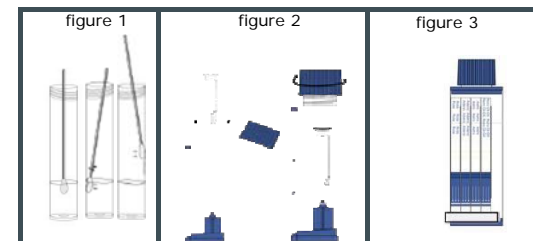

INTERPRETATION DES RESULTATS

Exemple : Procédure de la référence : 7355040

RESULTATS	Adenovirus Resp	INTERPRETATION
	Positif	Une bande verte (ligne de contrôle (C)) et une bande rouge (ligne de test (T)) apparaissent dans la fenêtre des résultats pendant la performance du test en raison de la présence d'antigènes de d'Adénovirus contenus dans l'écouvillon de contrôle positif.
	VERT-ROUGE	
	Résultat invalide , nous recommandons de répéter le test avec un autre test et écouvillons de contrôle positifs.	

Exemple : Procédure de la référence : 7715043

RESULTATS	Influenza A + B + RSV + Adenovirus Resp	INTERPRETATION
	Positif	Pour la zone A , une bande verte (ligne de contrôle (C)) et une bande rouge (ligne de test (T)) apparaissent sur les bandelettes de résultat pendant la performance du test en raison de la présence d'antigènes d'Adénovirus contenus dans l'écouvillon de contrôle positif.
	VERT-ROUGE	
	Résultat invalide , nous recommandons de répéter le test avec un autre test et écouvillons de contrôle positifs.	

RESULTATS INVALIDES : Absence totale de la bande de contrôle colorée (vert), quelle que soit l'apparence ou non de la bande Test (rouge), ou présence seulement de la bande témoin colorée (C) (verte). Les techniques de procédure incorrectes ou de détérioration des réactifs sont les principales raisons du non fonctionnement de la bande de contrôle. Examiner la procédure et répéter le contrôle avec un nouveau test et un nouvel écouvillon de contrôle positif.

SYMBLES DES COMPOSANTS IVD ET REACTIFS

	Dispositif de diagnostic in vitro		Maintenir au sec
	Consulter la notice d'utilisation		Limites de températures
	Expire le		Fabricant
	N° de lot		Quantité suffisante pour <n> tests
	Diluant d'échantillon		Code produit
	Contrôle positif		

