

MAST® DISCMASTER

Nouvelle génération de distributeurs Mast
Le meilleur de la technologie



Nouveau
DiscMaster
16

- Distributeurs 16 et 6 disques
- Excellente durée de conservation
- Compatible avec le CA-SFM / EUCAST
- Excellente protection contre l'humidité

MAST® DISCMaster 16 et DISCMaster 5

Le **Nouveau DISCMaster** a été développé pour optimiser les performances et apporte une solution fiable et robuste pour la distribution des disques pour le test de sensibilité aux antibiotiques (AST), des disques d'identification (ID) et des disques combinés de la gamme **MASTDISCS®**.

Les distributeurs DISCMaster disponibles en format 16 et 6 disques assurent une excellente ergonomie en routine pour une intégration en douceur dans les flux de travail des laboratoires.

La gamme DISCMaster est complétée par une vaste gamme de disques de test présentés dans des cartouches de distribution avec une assurance qualité garantie en conformité avec les standards CA-SFM / EUCAST et CLSI.

Excellente durée de conservation en station

Grâce au design novateur des distributeurs MAST® DISCMaster, tous les disques antibiotiques **MASTDISCS® AST**, y compris le groupe des carbapénèmes, sont stables pendant 4 semaines pour des résultats précis et fiables lorsqu'ils sont stockés avec un dessiccant chargé et actif.

Hauteur ajustable

Hauteur de la jupe ajustable en fonction de l'épaisseur de la gélose.

Signal sonore de positionnement de la cartouche

Un 'click' sonore permet de vérifier que les cartouches sont bien insérées dans le distributeur.

Protection renforcée contre l'humidité

Les joints souples du coffret spécialement conçus offrent une excellente protection contre l'humidité. Conçu pour être utilisé avec les capsules MAST® Silica Gel, disponibles en stock.

Positionnement des disques

Les disques **MASTDISCS®** sont appliqués à la surface de la gélose de manière précise par rapport aux positions définies à chaque cycle de distribution.

Blocage automatique lors de la détection de cartouches vides

Verrouillage automatique alertant l'utilisateur de la présence de cartouches vides.

INFORMATION

Code MAST	Désignation	Présentation
MDD16	MAST® DISCMaster 16 dispenser - Distributeur 16 disques	1
SILICA 16	Capsules Mast Silica Gel pour MAST® DISCMaster MDD16	2
MDD65	MAST® DISCMaster 5 dispenser - Distributeur 6 disques	1
SILICA 63	Capsules Mast Silica Gel pour MAST® DISCMaster MDD65	4

v2 LG 01/12/2021 - MUK799

Royaume Uni
Mast Group Ltd.
Mast House
Derby Road, Bootle
Merseyside L20 1EA

Tel: + 44 (0) 151 933 7277
Fax: + 44 (0) 151 944 1332
e-mail: sales@mastgrp.com

Allemagne
Mast Diagnostica GmbH
Feldstrasse 20
DE-23858 Reinfeld

Tel: + 49 (0) 4533 2007 0
Fax: + 49 (0) 4533 2007 68
e-mail: mast@mast-diagnostica.de

France
Mast Diagnostic
12 Rue Jean-Jacques Mention
CS 91106
80011 Amiens CEDEX 1

Tél. + 33 (0) 322 80 80 67
Fax + 33 (0) 322 80 99 22
e-mail: info@mast-diagnostic.fr